

Vielen Dank für Ihren Kauf des Schutzschildes PROTECTOR19



WIR SIND HERSTELLER IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK



VERPACKUNGSIHALT

1 Stk. Stirnband



1 Stk. Kinnenteil

1 Stk. Plexiglas mit Folienschutz

(vor dem Zusammenbau entfernen)

1 Stk. Gummiband für die Befestigung

1 Stk. Anleitung - Umgang mit dem Schild,

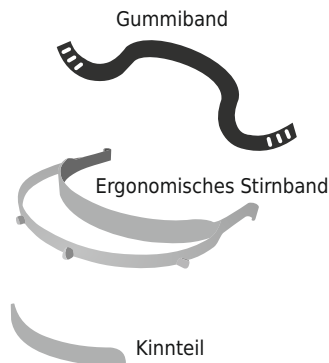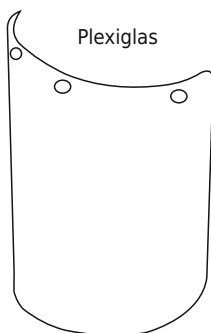



Wartungsanweisungen und Montage

ANLEITUNG

***wir empfehlen, die einzelnen Teile vor dem Zusammenbau zu desinfizieren**

1. entfernen Sie die Schutzfolie von dem Plexiglas
2. befestigen Sie das Plexiglas an das Stirnband - Nippel in die Öffnungen schieben
3. schieben Sie das Kinnenteil mittig an die untere Kante
4. befestigen Sie das Gummiband an die Haken
- wählen Sie die Öffnungen nach Ihrer Grösse

entfernen Sie die Schutzfolie von dem Plexiglas

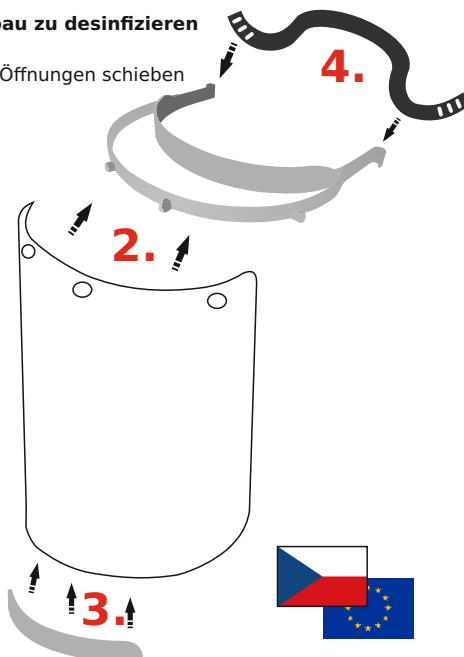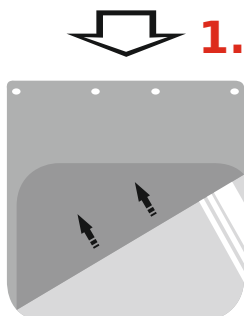

www.PROTECTOR19.com
Made in CZECH REPUBLIC



Vielen Dank für Ihren Kauf des Schutzschildes PROTECTOR19



WIR SIND HERSTELLER IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK



VERWENDUNG

Schutzschild PROTECTOR ist ein Gesichtsschutz der Ihre Augen und Ihren Mund vor direktem Kontakt mit feinen Partikeln schützt.

Es kann im Gesundheitswesen als Barriere gegen Viren und Bakterien eingesetzt werden, verhindert den Kontakt während des Wassersprühens bei Dentalbehandlungen in der Stomatologie, bei Hobbyaktivitäten, z. B. in der Werkstatt usw.

PFLEGE

Wir empfehlen, die einzelnen Teile vor dem Zusammenbau zu desinfizieren und zu reinigen. Selbst wenn wir versuchen die sterilsten Bedingungen bei der Verpackung zu gewährleisten, ist es wichtig, jegliches Kontaminationsrisiko zu vermeiden.

Desinfizieren Sie bitte nicht mit agresiven Chemikalien!

! WICHTIGE INFORMATION !

Der Gesichtsschutz PROTECTOR19 ist nicht für den Einsatz in der Industrie vorgesehen, z. B. bei Winkelschleifen, Kettensägen, Schweißen usw.

In diesen Fällen erfolgt die Verwendung auf eigenes Risiko



PARTNERS



Technicplast

Vstříkované plastové díly

www.technicplast.com



vytiskneme3d.cz

Schutzschildes **PROTECTOR19** - www.PROTECTOR19.com